

Gehörschutz (D) (CH) (A) für Einmalgebrauch

Der Gehörschutz von 3M wurde entwickelt, um das Gehör gegen schädlichen Lärm und irritierende Geräusche zu schützen.

1. Durch den Tag schützen sie gegen Geräusche die durch Verkehr, schreiende Kinder, Strassenarbeiten usw. verursacht werden.
2. In der Nacht wird der 3M Gehörschutz gegen Schnarchgeräusche, Verkehrsgeräusche usw. eingesetzt, damit ein ungestörter Schlaf gewährleistet ist.

Gebrauchsanweisung:

Damit das Ohr optimal geschützt ist, sollten Sie folgende Anweisungen befolgen:

1. Den Gehörschutz langsam zwischen den Fingern rollen, bis er zusammengedrückt ist.
2. Den Gehörschutz langsam in den Ohrkanal einführen. Dieser Vorgang ist einfacher, wenn das Ohr auf- und abwärts bewegt wird.
3. Leicht angedrückt halten, bis sich der Gehörschutz dem Ohr angepasst hat.
4. Der Gehörschutz muss in dieser Position bleiben. Falls er sich durch Bewegung lösen sollte, einfach wieder anpassen.

Vor jedem Gebrauch sollten die Gehörschütze kontrolliert werden, ob sie Schäden aufweisen

Grösse:

Der 3M Gehörschutz passt für die meisten Gehörgänge (gem. EN 352-2)

Gehörschütze sollten nicht bei Kindern unter 6 Jahren angewendet werden.

Warnungen:

1. Dieses Produkt ist ein Einweg-Artikel und sollte nach Gebrauch entsorgt werden. Vor dem Gebrauch sollte es in der Originalpackung belassen werden.
2. Der 3M Gehörschutz darf nicht in Kontakt mit chemischen Substanzen kommen. Chemikalien können das Produkt schädigen und negative Auswirkungen auf die Schutzfunktion des Produktes haben. Weitere Informationen können beim Hersteller angefragt werden.

Bei der Anwendung von 3M Gehörschutz sollten Sie die folgenden Punkte immer beachten:

1. Geeignet für die gewünschte Anwendung.
2. Sitzt fest im Ohr.
3. So lange das Ohr dem Lärm ausgesetzt ist, müssen die Gehörschütze getragen werden.
4. Nach Gebrauch entsorgen.

Warnung:

Sofern Sie den Gehörschutz nicht korrekt einsetzen, wie es in dieser Beilage beschrieben ist, kann die Leistung des Gehörschutzes beträchtlich beeinflusst werden und es kann zu Hörschäden führen. Sollten Sie Fragen haben, wie man dieses Produkt korrekt appliziert, kontaktieren Sie Ihren Drogisten, Apotheker oder direkt 3M.

Genehmigung:

Der 3M Gehörschutz entspricht der dem Europ. Standard EN 352-2 1993 und erfüllt die Basic Requirements wie in Beilage II der EU Direktive 89/686 dargelegt.

Es ist CE markiert.

Der 3M Gehörschutz ist nicht wiederverwendbar und sollte nach Gebrauch entsorgt werden.

